




スターボールシールドの組み立て方

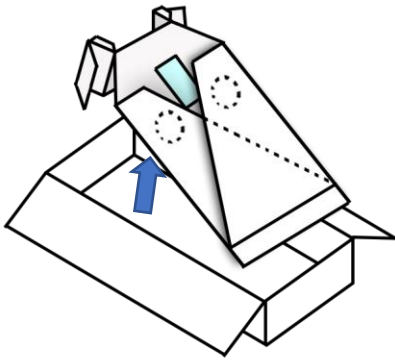

箱から出す

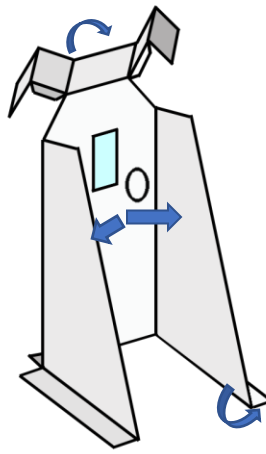

シールドを広げる

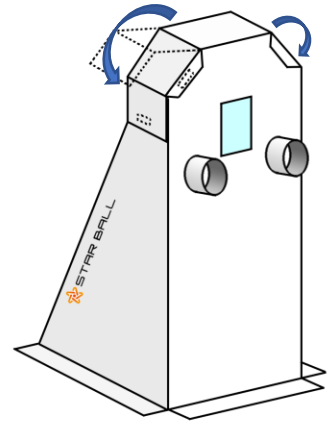


マジックテープで固定します

PCR・インフルエンザの検体採取・喉の診察や頸部リンパ節の触診も可能！

密閉式ではないので、検査時の指示
や簡単な問診も可能です。

防護具は必ず装備して下さい！

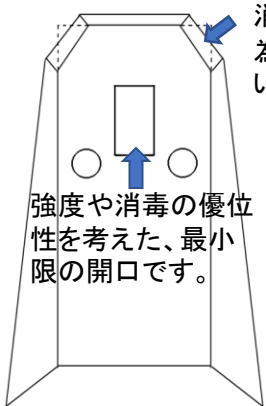

消毒し残しを防ぐ
為に、角を取って
います。

強度や消毒の優位
性を考えた、最小
限の開口です。

養生テープなどで
固定出来る！




**被験者全体を覆うこと
で、突然の暴露を防ぎ
ます！**

実用新案取得済！


シールドは軽いので
移動・保管も簡単！

手袋の装着の方法


検体採取側から
手袋を挿入します。

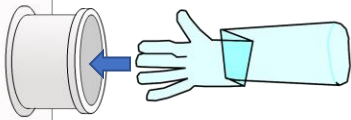

手袋の輪ゴムを伸
ばしながら広げて

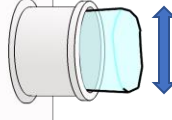

筒の突起に手袋の
ゴムを引っ掛けて
ください。

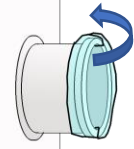

親指を上にして挿入するのがポイントです。

**検査終了後は、手袋を裏返し
ながらそのまま手を抜いて、
汚染部を内側にして廃棄
してください。**



専用の手袋は特にありません。
市販の「ポリエチレン手袋ロングタイプ」
のほとんどが使用できます。
※手元に輪ゴムが入ったもの以外は使用
できません

使用法の動画をご覧ください。

<https://starball-inc.com/star-ball-shield>

STAR BALL

株式会社 スターボール

〒802-0003

福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1 6F



使用方法

スターボールシールドは着座状態で作業できるように作られています。被験者の体全体を囲う事で、突然の暴露からドクターを守る事が主目的となっており、防護具が必要ないという事ではございません。

防護具は必ず装備して下さい！



作業終了時は、図の様に汚染部が内側に来るように手をゆっくり抜きます。最後は根元を押さえてポンと取り外し、密閉して廃棄してください。

使用例①



- ① 検査用スワブを被験者が持ってシールドの前に座ります。
- ② 被験者が検査用スワブを医師に渡し、医師がシールド越しに検体採取作業を行う。
- ③ 検体採取後、被験者にケースを渡し、事前に用意した検体置き場に被験者の手で置いてもらう。
- ④ 被験者退出 → 検体を回収

使用例②

※この方法は介助が必要です。



① 介助者が医師にスワブを渡す

② 検体採取

③ スワブをスピッツにもらい受ける

④ 10回以上攪拌する

⑤ 剪刀でスワブをカット



⑥ 蓋を閉める



⑦ パラフィルムで密閉



⑧ ラベルを貼る



⑨ ジップ付き袋に入れ

検査へ